

Coussin pivotant Deluxe

Art. no° : 23513

MODE D'EMPLOI



Le coussin pivotant deluxe permet facilement de balancer les jambes et de s'abaisser. Il facilite également les rotations en bonne position pour entrer et sortir de la voiture et est aussi parfait sur la chaise. Idéal pour

- les personnes âgées,
- les personnes en convalescence après une intervention chirurgicale ou des blessures
- les personnes ayant une force réduite dans la partie inférieure du corps

Caractéristiques :

- sûr. La base antidérapante maintient le coussin en place.
- coussin souple ultra-épais pour un confort accru
- rotation à 360 degrés
- couverture hygiénique lavable, facilement amovible
- protection 100% polyester (lavage à la main)
- diamètre env. 39 cm
- capacité de charge maximum :150 kg

Utilisation :

- placez le coussin de pivotement deluxe sur le siège du véhicule et abaissez-vous sur ce dernier.

- en vous tenant avec l'intérieur de la main, mettez vos jambes à l'intérieur du véhicule, l'une après l'autre
- en vous tenant avec les deux mains, mettez vous dans une position confortable

PRUDENCE !

Ne laissez pas le coussin de pivotement deluxe sur le sol – risque de glissement ! Avant de vous mettre en route pour un voyage, vérifiez et assurez-vous des propriétés antidérapantes du coussin de pivotement deluxe sur votre siège.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.

Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 19.10.2013