

**Deluxe Draaikussen**  
**Art. Nr. 23513**  
**Gebruiksaanwijzing**



Het Deluxe Draaikussen maakt het makkelijker om met de benen en het onderlichaam rond te draaien. Het vergemakkelijkt het in de juiste positie draaien bij het in en uit de auto stappen, maar is ook op een gewone stoel erg gemakkelijk. Ideaal voor

- ouderen,
- mensen die van een operatie of verwonding herstellen
- mensen met een verminderde kracht in het onderlichaam

Kenmerken:

- Veilig. Antisliplaag houdt kussen op zijn plaats
- Extra comfort met extra dik zacht kussen
- Draait 360 graden in het rond
- Hygiënische wasbare, makkelijk te verwijderen hoes
- 100% polyester hoes (met de hand wassen)
- Diameter ca. 39 cm
- Maximale belasting: 150 kg

Gebruikshandleiding:

- Plaats het Deluxe Draaikussen op de autostoel en neem erop plaats.

- Houd u met de hand in de auto vast en draai uw benen een voor een in de auto.
- Houd uzelf met twee handen in de auto vast en ga in een gemakkelijke positie zitten

### **LET OP!**

Laat het Deluxe Draaikussen niet op de grond liggen - gevaar om uit te glijden!  
Controleer voor u uw reis begint of de antisliplaag van het Deluxe Draaikussen werkt op uw autostoel.

### **AFVALVERWIJDERING:**

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  
in Nederland tel.: 026 3736 333 of [info@eurotops.nl](mailto:info@eurotops.nl)

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres  
vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse  
gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur  
voorbehouden.

© 19.10.2013